

DualCap® Solo™-Cappuccio Disinfettante per Valvole di Accesso Luer

CODICE	MODELLO
450LB	Cappuccio disinfettante monouso DualCap® Solo™ per valvole di accesso luer femmina

FABBRICANTE:	Merit Medical Systems Inc. – Utah (USA)
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:	INNOVAMEDICA SPA – Cusago, MI (Italia)

Descrizione:	<p>Il connettore DualCap® Solo™ è un dispositivo monouso costituito da un tappo con connessione luer avvitabile su tutte le valvole di accesso luer femmina all'interno del quale è presente una spugnetta imbevuta di alcool isopropilico al 70%.</p> <p>La sua funzione è quella di assicurare, per i 7 giorni successivi la sua connessione, una disinfezione di tutti i dispositivi a cui è connesso un connettore valvolato tipo needle free connector.</p> <p>Il DualCap® Solo™ si utilizza quindi come accessorio utile ad abbattere il rischio infettivo ed a creare una barriera antimicrobica su tutti i connettori degli accessi venosi, siano essi CVC, PICC, midline o altre tipologie. Ogni volta che sia necessario infondere si dovrebbe utilizzare o sostituire il DualCap® Solo™.</p> <p>Se viene lasciato in posizione senza essere rimosso per 30 secondi, DualCap® Solo™ disinfetta i connettori valvolati ad accesso luer femmina formando una barriera fisica contro la contaminazione che, in condizioni normali, può durare fino a 7 giorni.</p> <p>L' applicazione di DualCap® Solo™ avviene tramite avvitamento con filettatura e ha certificazione ISO per le connessioni luer lock. Il dispositivo copre e protegge tutte le superfici critiche del connettore luer lock maschio, ha superficie liscia per prevenire l'insorgenza di irritazioni cutanee ed impugnatura ergonomica per facilitare la presa ed il posizionamento del dispositivo.</p> <p>DualCap® Solo™ è un dispositivo coperto da brevetto.</p> <p>DualCap® è certificato ISO 80369 per le Connessioni Luer Lock.</p>
Materiale:	Materiale plastico di grado medicale, alcool isopropilico. Dispositivo latex free e privo di ftalati
Area di applicazione:	Sistemi di disinfezione per accessi venosi.
Confezione:	Confezione da 350 pezzi.
Classe:	IIa
Metodo di sterilizzazione:	Raggi Gamma. Sterile fino a quando la confezione esterna è chiusa e non danneggiata.
Durata:	3 anni dalla data di sterilizzazione.
Conservazione:	Conservare DualCap® Solo™ ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 30°C
Marchi e Certificazioni:	Prodotto marcato CE conforme alla direttiva CEE 93/42 Organismo Notificato N. 0086
Codici CND	A0706
Repertorio N.	1644488/R